


Pesando crianças menores de 2 anos ou com até 16 kg

BALANÇA PEDIÁTRICA MECÂNICA




1º PASSO

Certificar-se de que a balança está apoiada sobre uma superfície plana, firme e lisa. Forrar o prato com uma proteção antes de calibrar para evitar erros na pesagem.

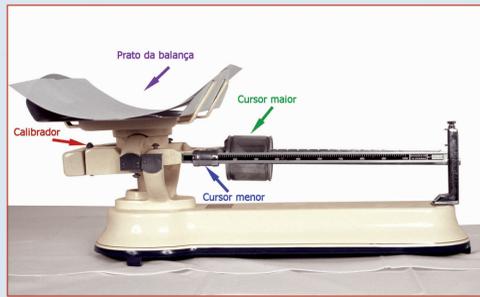

2º PASSO

Verificar se a balança está travada. Destruvar a balança.

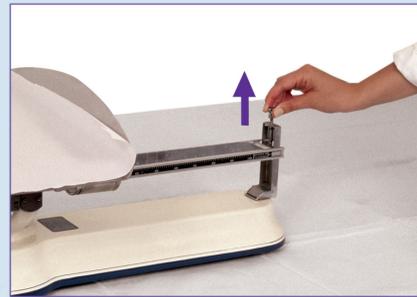

3º PASSO

Observar se a balança está calibrada (a agulha do braço e o fiel devem estar na mesma linha horizontal). Caso contrário, girar leve e lentamente o calibrador, até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados.



4º PASSO

Após constatar que a balança está calibrada, ela deve ser travada.

5º PASSO

Colocar a criança despida no centro do prato da balança, sentada ou deitada, de modo a distribuir o peso igualmente. Destruvar a balança, mantendo a criança parada o máximo possível nessa posição. Orientar a mãe/responsável a manter-se próximo sem tocar na criança e no equipamento.




6º PASSO

Mover os cursores sobre a escala numérica, primeiro o maior para os quilos.



7º PASSO

Depois o menor para os gramas.

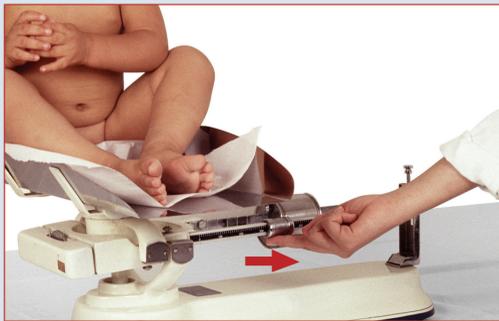

8º PASSO

Esperar até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados.



9º PASSO

Travar a balança, evitando que sua mola desgaste, assegurando o bom funcionamento do equipamento.



10º PASSO

Realizar a leitura de frente para o equipamento, a fim de visualizar melhor os valores apontados pelos cursores.



11º PASSO

Anotar o peso na ficha do SISVAN/prontuário.



12º PASSO

Retirar a criança e retornar os cursores ao zero na escala numérica.



13º PASSO

Marcar o peso no Cartão da Criança.

